

Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-1

Мойки для эндоскопов



Ваша цена

Розница

55 200 руб.

Оптовая цена

53 489 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
```

```
<div class="content__col">
```

```
<div class="content-area">
```

```
<h3>Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-1</h3>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="content__col">
```

```
<div class="content-area">
```

```
<p>Установка КРОНТ УДЭ-1 — специализированное оборудование для проведения дезинфекции
высокого уровня &#40;ДВУ&#41; гибких эндоскопов, видеоэндоскопов и эндоскопов с
ультразвуковыми датчиками отечественного и импортного производства. Устройство предназначено
для безопасной и эффективной обработки всех полостей и каналов эндоскопов с помощью
дезинфицирующих растворов.</p>
```

```
<p>Конструкция установки включает цельнолитую ванну с крышкой из ударопрочного химически
стойкого пластика, предотвращающую испарение растворов, а также ручной двухходовой насос для
заполнения внутренних каналов эндоскопа без образования пузырьков воздуха. Ванна выполнена из
полистирола с обтекаемыми контурами, что исключает критические изгибы эндоскопа во время
обработки. Слив отработанных растворов осуществляется через силиконовую трубку с фиксируемым
наконечником.</p>
```

```
<p>Установка смонтирована на рамной конструкции в виде тележки с четырьмя поворотными
колёсными опорами Ø75 мм с резиновым ободом и пластиковыми амортизирующими отбойниками,
две из которых оснащены тормозом для надежной фиксации. Поддон и навесные полки выполнены
из полипропилена, самофиксирующиеся и легкосъёмные, что облегчает санитарную обработку.</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
```

```
<div class="content__col">
```

```
<div class="content-area">
```

```
<h4>Комплектующие</h4>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="content__col">
```

```
<div class="content-area">
```

```
<ul>
```

```
<li><strong>Поддон и навесные полки из полипропилена.</strong> Для удобства проведения
санитарной обработки выполнены самофиксирующимся и легкосъёмными.</li>
```

```
<li><strong><a href="https://www.nv-med.ru/catalog/yemkost-konteyner-kront-kds-0-2/">
Ёмкость-контейнер полимерный КДС-0,2</a></strong> &#40;2 шт.&#41; с перфорированным
поддоном и крышкой, рабочий объём 0,2 ± 0,05 л, габаритный размер Ø96 × 72 мм.</li>
```

```
<li><strong><a href="https://www.nv-med.ru/catalog/yemkost-konteyner-dlya-dezinfektsii-kront-kds-1/">
Ёмкость-контейнер полимерный КДС-1</a></strong> &#40;1 шт.&#41; с перфорированным поддоном и крышкой,
рабочий объём 1 ± 0,2 л, габаритный размер 280 × 155 × 105 мм.</li>
```

```
<li><strong><a href="https://www.nv-med.ru/catalog/yemkost-konteyner-dlya-dezinfektsii-kront-kds-10/">
Ёмкость-контейнер полимерный КДС-10</a></strong> &#40;2 шт.&#41;,, рабочий объём 10 ± 1,6 л, габаритный размер
450 × 325 × 205 мм.</li>
```

```
<li><strong>Комплект приспособлений для подключения эндоскопов</strong> &#40;адаптеры и
приспособления&#41; предназначены для подключения различных моделей эндоскопов Olympus,
Pentax и ЛОМО.</li>
```

```

</ul>
</div>
</div>
</div>

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Технические характеристики</h4>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <table>
        <tr>
          <th>Характеристика</th>
          <th>Значение</th>
        </tr>

        <tr>
          <td>Масса транспортной упаковки</td>
          <td>25 кг</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Номинальная нагрузка</td>
          <td>47 кг &#246;ванна – 22 кг, поддон – 20 кг, две полки – 5 кг&#246;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Внутренние размеры ванны</td>
          <td>560 × 420 × 160</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Рабочий объём ванны</td>
          <td>14 ± 1 л</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Максимальный объём ванны</td>
          <td>20 ± 2 л</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Объём жидкости за 1 рабочий цикл</td>
          <td>30 ± 3 см³</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Колёсные опоры</td>
          <td>4 шт., Ø75 мм, 2 шт. с тормозом</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Срок службы</td>
          <td>не менее 5 лет</td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<meta name="keywords" content="дезинфекционная эндоскопическая установка, КРОНТ УДЭ-1,
дезинфекция эндоскопов, оборудование для ДВУ, обработка гибких эндоскопов, видеоэндоскоп,
эндоскоп с ультразвуковым датчиком">
<meta name="description" content="Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-1:
высокоэффективная дезинфекция гибких эндоскопов и видеоэндоскопов. Ванна с крышкой, ручной
насос, тележка на колёсных опорах, рабочий объём 14 л, максимальный объём 20 л.">
<meta name="title" content="Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-1 — купить,
характеристики, применение">

```

Преимущества

Установка КРОНТ УДЭ–1 предлагает ряд преимуществ, которые делают её надёжным и удобным решением для организации процесса дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов в медицинских учреждениях:

- Высокая эффективность ДВУ — обеспечивает полный контакт дезсредства со всеми поверхностями и стенками каналов эндоскопа.
- Ручной двухходовой насос с подачей без образования пузырьков — гарантирует заполнение внутренних каналов без разрывов струи и непроветриваемых зон.
- Экономный расход дезинфицирующего средства — обтекаемая форма ванны и конфигурация

крышки минимизируют испарения и перерасход.

- Универсальность подключения — комплект адаптеров для Olympus, Pentax и ЛОМО обеспечивает совместимость с большинством моделей эндоскопов.
- Надёжная конструкция тележки — поворотные колёсные опоры Ø75 мм с резиновым ободом и двумя тормозами для устойчивого закрепления в рабочем месте.
- Простота санитарной обработки — поддон и навесные полки из полипропилена самофиксирующиеся и легкосъемные для быстрой очистки и дезинфекции.
- Двухступенчатая фильтрация растворов — удаляет соли жёсткости и белковые остатки, что повышает качество повторного использования рабочих растворов.
- Безопасность для эндоскопов — ванна выполнена из полистирола с обтекаемыми контурами, исключая критические изгибы и повреждения при обработке.
- Удобство работы с инструментами и аксессуарами — в комплекте ёмкости КДС-0,2, КДС-1 и КДС-10 для обработки и хранения принадлежностей и ополаскивания.
- Гибкость в выборе дезсредств — установка допускает работу любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами, что упрощает внедрение существующих протоколов в учреждении.
- Комплектация, ориентированная на практику — объём ванны и параметры прокачки рассчитаны на эффективную обработку современных гибких эндоскопов и видеосистем.
- Длительный срок службы и гарантия — разработана для многолетней эксплуатации с гарантийным сроком 24 месяца и ресурсом не менее 5 лет.

Установка КРОНТ УДЭ-1 является практичным решением для эндоскопических кабинетов и лабораторий, сочетая безопасность обработки, экономичность расхода реагентов и удобство обслуживания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для эндоскопического отделения
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027253.pdf
Габариты, мм	960 × 635 × 1 230
Вес, кг	23
Габариты в упаковке, мм	990 × 260 × 640
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.