

## Комбинированный экспресс-тест GenSure на коронавирус SARS-CoV-2, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус и грипп A+B

Экспресс-тесты на COVID-19 и грипп

Ваша цена

Розница

**620 руб.**

Оптовая цена

**589 руб.**



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 10 %



### Описание

#### Комбинированный экспресс-тест GenSure на коронавирус SARS-CoV-2, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус и грипп A+B

Комбинированный экспресс-тест GenSure — современная иммунохроматографическая тест-система, предназначенная для одновременного качественного выявления и дифференциации антигенов SARS-CoV-2, вируса гриппа А и В, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса (RADV) в образцах мазков из носа или носоглотки.

Тест применяется для экспресс-диагностики респираторных вирусных инфекций и может использоваться как в условиях медицинских учреждений, так и в домашних условиях для самотестирования. Обеспечивает быстрый результат без необходимости использования лабораторного оборудования.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора: № РЗН 2024/21945 от 29 января 2024 года.

#### Особенности

- Одновременное определение антигенов SARS-CoV-2, гриппа А, гриппа В, RSV и аденовируса.
- Иммунохроматографический метод анализа.
- Подходит для профессионального и домашнего использования.
- Высокая чувствительность и специфичность.
- Быстрое получение результата — через 10–15 минут.
- Не требует специального оборудования или подготовки персонала.
- Поставляется в индивидуальной упаковке (6 тестов в коробке).

#### Комплектация

- Тестовая кассета с четырьмя лунками.
- Пробирка с буферным раствором и капельницей.
- Зонд для забора биоматериала в индивидуальной упаковке.
- Инструкция по применению.

#### Порядок проведения теста

- Перед началом тестирования довести набор до комнатной температуры.
- Взять образец из носа или носоглотки с помощью зонда.
- Погрузить зонд в пробирку с буферным раствором на 15 секунд, тщательно перемешать.
- Установить колпачок и нанести 3 капли подготовленного образца в каждую лунку тест-кассеты.
- Оценить результат через 10–15 минут. Не интерпретировать результаты позднее 20 минут.

#### Интерпретация результатов

- Положительный результат — красная линия появляется на линии С и на одной или нескольких линиях Т, А, В, независимо от интенсивности окрашивания.
- Отрицательный результат — видимая линия только на линии С, линии Т, А и В отсутствуют.
- Недействительный результат — отсутствие линии С, что указывает на ошибку проведения теста или дефект кассеты.

Отрицательные результаты не исключают инфекцию и должны оцениваться в контексте клинических данных, истории болезни и эпидемиологической ситуации.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип теста	Иммунохроматографический, комбинированный
Определяемые антигены	SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, RSV, Adenovirus
Тип биоматериала	Мазок из носа или носоглотки
Время получения результата	10–15 мин
Температура хранения	от +2 до +30 °C
Срок годности	24 мес
Количество тестов в упаковке	6 шт.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	GenSure Biotech Inc
<b>Страна бренда</b>	Китай
<b>Отрасли</b>	Для дома
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032784.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032784.pdf</a>

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.